

www.sw-perfect.com



扫一扫公众号
获取葆丰更多产品资讯



扫一扫视频号
获取根管治疗相关知识

深圳市葆丰医疗器械有限公司
Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd

邮箱: likee@dental-perfect.com

地址: 深圳市龙岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103

电话: 0755-28540953

传真: 0755-28540953

powered by:



2023/07/25

RETREATY

Endodontics kit

再治疗锉

一种专门用于根管再治疗的系统
以微创的治疗理念而设计
遵循Styleitaliano牙髓病学原理

 perfect® 葆丰




RETREATY

Endodontics kit

再治疗锉



型号	Size	扭矩	Torque
BullY	25/.07	1.5N-CM	
SkinnY	25/.04	1.5N-CM	
ShapY 1	20/.04 (05)	1.5N-CM	
ShapY 2	25/.04 (05)	1.5N-CM	
ShapY 3	30/.04 (05)	1.5N-CM	

横截面 Cross section:  转速 Speed range: 350~500RPM

两种模式可选择 A: 顺时针旋转 B: 逆时针旋转: 顺时针150°、逆时针30°

BULLY

25/.07

专门用于根管再治疗过程中去除牙胶充填材料。金色合金热处理、尖端切割角设计,较短的工作螺纹,短时间内无需任何溶剂可快速清除根管上部1/3的充填材料。



如今,与首次根管治疗对比,根管再治疗越来越多,而且再治疗其病因更为复杂,将原根管充填物在进行去除的过程中不但耗费时间而且困难,这就是为什么我们决定根据 Styleitaliano 牙髓病学的原理,设计一种特定的治疗系统,以微创的方式进行再治疗。



SKINNY

25/.04

银色合金,弹性强切割锋利,有效去除根管的牙胶充填物,保留根管的形态,并在接近根尖末端创建一条可重复顺滑通道。



SHAPY 1

20/.04 (05)

这是第一支成型锉,金色合金,柔韧但具有良好的切割能力,遵循根管原始结构。

SHAPY 2

25/.04 (05)


再治疗中最流行的精修型号,金色合金,具有良好的柔韧性和抗折断性能。



SHAPY 3

30/.04 (05)

蓝色合金,顶端形状扩大时,具有更高的灵活性。在不改变原始解剖结构的情况下实现最大程度的预备。

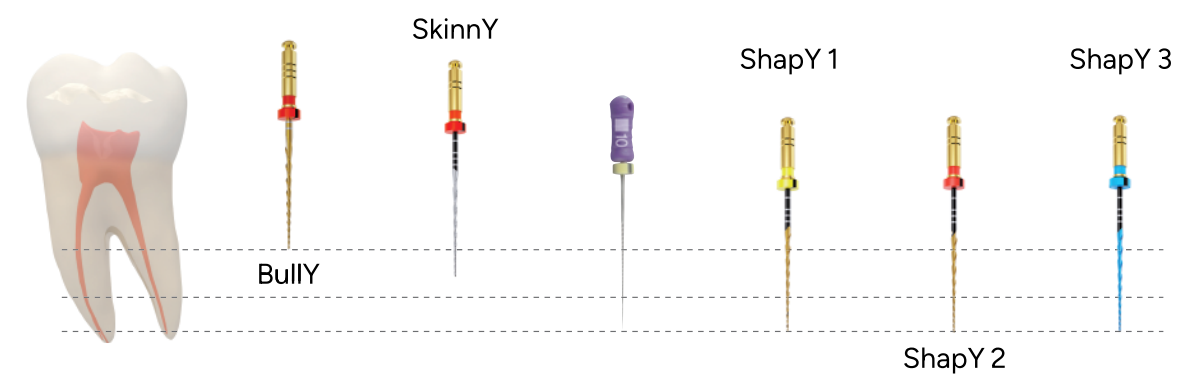

1. 观察不同角度的X光片,以确定根管位置、宽度、长度和曲率;
2. 开髓以便轻松识别每个根管口;
3. 选择顺时针旋转或往复旋转(顺时针150°、逆时针30°)模式,使用Bully与牙胶充填物接触,如未达到被动穿透,则在孔口1/3处去除牙胶充填物,不要施加推力;
4. 使用Skinn Y,去除根管中部牙胶充填物,在根管内以1-3mm缓缓进入;
5. 用K锉电子测量工作长度,并通畅根管;
6. 使用ShapY 1 疏通至工作长度,依次使用ShapY 2和ShapY 3,完成根管预备成型。